

# ALLES SPÜLT

## ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE

[www.bmbwf.gv.at/allerspult](http://www.bmbwf.gv.at/allerspult)

### WICHTIG

30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT ZÄHNE PUTZEN, KAUGUMMI KAUFEN, TRINKEN, ESSEN ODER RAUCHEN.



SICHERE SCHULE  
[www.sichereschule.at](http://www.sichereschule.at)

Bundesministerium  
Bildung, Wissenschaft  
und Forschung

**COVID-19 NACHGEWIESEN**  
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/  
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/  
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DIE  
ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

**COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN**  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!


TESTRÖHRCHEN  
MIT LÖSUNG



QR-CODES



SCHUTZBEUTEL

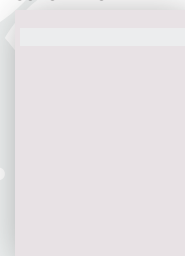

1

- Öffne das Teströhrchen
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 30 Sekunden im gesamten Mundraum im Kreis

2

- Spucke die Flüssigkeit in das Teströhrchen

3

- Verschließe das Teströhrchen mit der Verschlusskappe

4

- Löse einen QR-Code vom Bogen
- Klebe ihn oben mittig auf den grünen Deckel des Röhrchens

5

- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschließe ihn gut

6

- Gib die Probe in den Sack.